

Instrucciones de uso

Hyluprotect

Multidosis 15 ml

Hialuronato sódico 0,2 %

Aplicaciones:

- Para humectar y lubricar el ojo.
- Para aliviar las sensaciones de sequedad y las irritaciones benignas ocasionadas por las agresiones del entorno, el cansancio, el trabajo prolongado frente a pantallas de vídeo o el uso de lentes de contacto.

- Apta para el uso con lentes de contacto.

Características y modo de acción:

Hyluprotect contiene hialuronato sódico, un polímero natural que también está presente en las estructuras del ojo humano. Las características físicas especiales del hialuronato sódico confieren a Hyluprotect sus propiedades

“viscoelásticas” y de retención de agua. Hyluprotect proporciona un recubrimiento estable sobre la superficie del ojo, que tan solo es eliminado lentamente al parpadear. Por esto, Hyluprotect combina un alivio de larga duración con un máximo bienestar. Hyluprotect posee una tolerancia excelente debido a su composición única. La composición particular de los conservantes de Hyluprotect garantiza la esterilidad de la solución en el frasco multidosis abierto por un período de tres meses.

Composición por ml:

2 mg de hialuronato sódico,
0,0015 mg de polihexanida (PHMB),
0,1 mg de edetato sódico (EDTA),
Tampón fosfato isotónico, Agua purificada

Conservación:

Conservar a una temperatura de 2-25°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar antes de **3 meses** después de abrir el frasco.

No sobrepasar la fecha límite de caducidad que aparece en el envase exterior.

Modo de empleo:

Lavarse y secarse bien las manos antes de usar.

Compruebe que el frasco está intacto para estar seguro de su esterilidad.

Para abrir el frasco, girar el tapón de rosca en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Ponga el frasco boca abajo y vierta dos gotas en cada ojo cuidando no tocar el ojo con el frasco.

Para adultos y niños.

Precauciones de empleo:

No utilizar si el frasco está dañado.

No tocar el ojo con el frasco para evitar cualquier arañazo o infección del ojo.


En caso de aparición de problemas tras la utilización, consulte a su médico.

 **Lapis Lazuli International NV**

Bolderweg 2,
NL-1332 AT Almere
The Netherlands

STERILE A

C E 0413

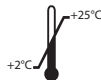

REF 1149/00 908

Distribuido por:

Laboratorios Thea, S.A.

C/Enric Granados nº86-88, 2ª planta
08008 Barcelona, España

 **Thea**

N1396BP15LTE/0319